




Clickfine®

Enjoy brilliance.

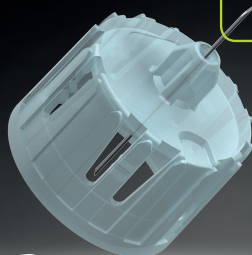

Erityisen
ohutseinämäisellä
kanyylillä

swissmade 

mylife™ Clickfine® DiamondTip – enemmän mukavuutta.

- 6 viisteisellä neulan kärjellä sujuvampi pistos^{1,2}
- Erityinen ohutseinämäteknologia takaa optimaalisen lääkkeen virtauksen³
- Neula napsahtaa helposti ja varmasti paikalleen
- Yhteensopiva kaikkien yleisimpien injektio-
kannen kanssa⁴ saatavana 4 mm, 5 mm, 6 mm,
ja 8 mm pituudet



More freedom. More confidence. With mylife™.


YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS



DiamondTip – täydellinen neulankärki


Erityisen hellävaraiseen pistämisen¹

Innovatiivista 6-särmäistä teknologiaa hyödyntävän mylife™ Clickfine® DiamondTip -kynäneulan kärki on ohuempi, minkä ansiosta vastus on pienempi pistämisen aikana.

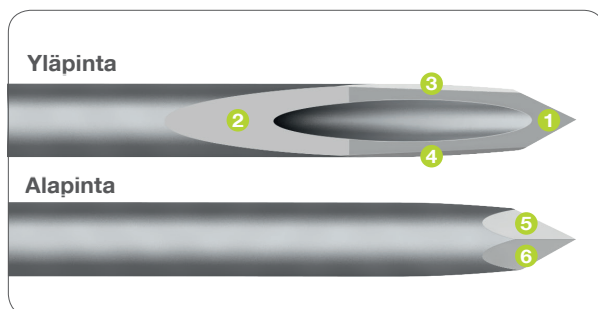

DiamondTip: Erittäin tarkka 6-särmäinen neulan kärki **1–6**.
Saatavana pituudet 4 mm, 5 mm, 6 mm, ja 8 mm pituudet.

**41 % vähemmän
vaivannäköä =
hellävarainen pistos**

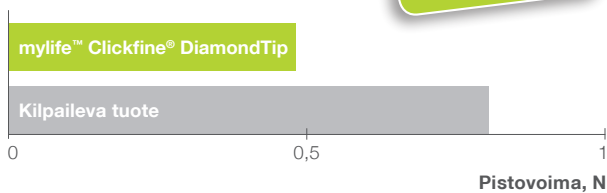

Koe osoittaa, että pistäminen mylife™ Clickfine® DiamondTip-kynäneulalla vaatii vähemmän vaivannäköä kuin vertailutuoteella.¹



Clickfine®



Käyttäjien vahvistama²

Miellyttävämpi, lähes huomaamaton pistos

77,3 % uutta mylife™ Clickfine® DiamondTip-kynäneulaa testanneista käyttäjistä tunti vähemmän kipua pistoksen aikana verrattuna.



- Tunti huomattavasti vähemmän kipua
- Tunti hieman vähemmän kipua
- Ei huomannut eroa
- Tunti enemmän kipua

Tätä mieltä ovat käyttäjät, jotka ovat verranneet mylife™ Clickfine® DiamondTip-kynäneulaa tavanomaiseen kynäneulaan:



“Suurin ero DiamondTip-kynäneulan ja vakiokynäneulan välillä on yksinkertaisesti kivun väheneminen sekä huomattavasti pienempi kynässä tuntuva vastus pistoksen aikana.”

Christian K.



“En pelkää kipua pistoksen aikana, mutta on tietysti hienoa, jos sitä ei tunnu. Käytän ehdottomasti DiamondTip-kynäneulaa tulevaisuudessa. Sen käyttäminen on erittäin miellyttävää, ja tästä ylellisyydestä en enää halua jäädä paitsi.”



Lisa T.



Erityisen ohutseinämäinen kanyyli

Optimaalinen lääkkeen läpivirtaus

Suurempi sisähalkaisija samalla ulkohalkaisijalla⁵

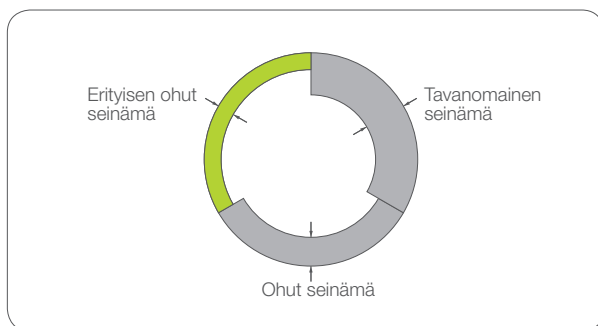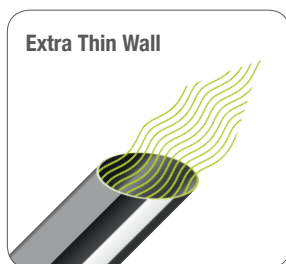


- Suurempi virtausnopeus tehostaa insuliinin annostelua³
- Kanyylin suuremman sisähalkaisijan ansiosta pistospainikkeen painamiseen tarvitaan vähemmän voimaa³
- Helpottaa vahvasti konsentroituja insuliinien annostelua 200 U/ml alkaen



Ensiluokkaiset laatuominaisuudet


Koe luotettavaa mukavuutta

Universal Click

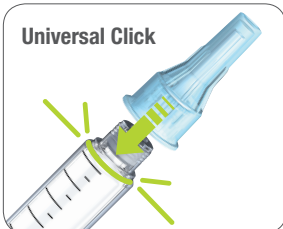

Helppo kiinnittää kynäneulaan patentoidun universal click-teknologian avulla.

Anti Coring

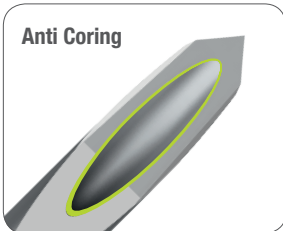

Erikoiskäsittely poistaa epätasaisuuksia, estää kärjen pintojen kulumisen ja mahdollistaa sujuvan pistämisen.

Easy Glide



Eriytynen silikonikäsitelty pinta ja kiinnittyvä silikoni kanyylissä takaavat vakaat liukuominaisuudet ja siten hellävaraisen pistoksen.




Hyvän pidon takaava ulkosuojus. Tiivistyskalvo on helppo irrottaa repäisyliuskan ansiosta.




Helppo


Kiinni napsautettava kynäneula⁴

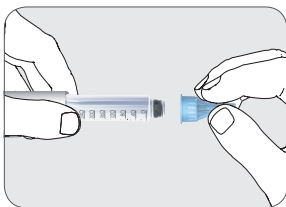


Paina kynäneula paikalleen.
Pysyvyys on varmistettu, kun kuuluu klikkaus.

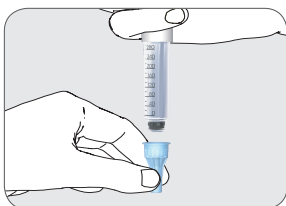

Vinkki: Laita kynäneula pystysuoraan pöytää vasten ja paina kynä yläkautta kiinni kynäneulaan.

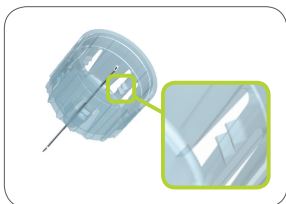

Viisi kiinnikettä varmistaa pysyvyyden.

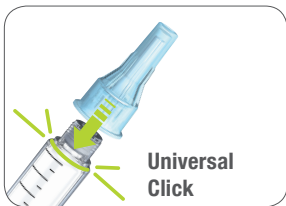

Patentoitu universal click –
teknologia.




Lyhyet kynäneulat

Luotettava ihonalainen pistos


Hyvin ennakoitavissa olevan insuliinivaikutuksen vuoksi on tärkeää, että insuliinipistos annetaan ihonalaiseen kudokseen (subkutaaninen injektio) eikä sen alla olevaan lihakseen. Jos insuliini pistetään lihakseen, seurauksena voi olla verensokerin vaihteluita ilman ilmeistä syytä sekä vakava hypoglykemia.

- Lyhyet kynäneulat vähentävät riskiä tahattomasta lihaksensisäisestä pistoksesta.
- 4 mm ja 5 mm kynäneula yksinkertaistaa injektiotekniikkaa. Pistokset voidaan usein antaa 90 asteen kulmassa ilman ihopoimun muodostamista (lasten, nuorten ja hoikkien aikuisten tulisi muodostaa ihopoimu).⁶

- 1 Iho (orvaskesi ja verinahka)
- 2 Ihonalainen rasvakerros
- 3 Lihas

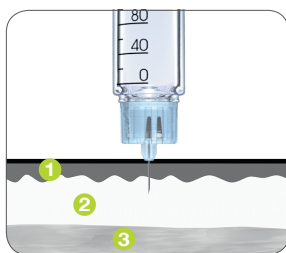

- ✓ 4 mm ja 5 mm:n kynäneula mahdollistaa usein turvallisen ihonalaisen pistoksen myös ilman ihopoimua. Noudata diabeteshoitajasi suosituksia.

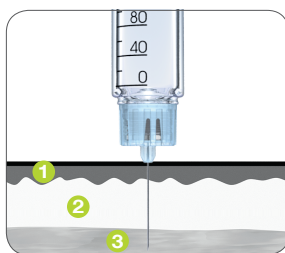

- ✗ Pitkät kynäneulat lisäävät lihaksensisäisen pistoksen riskiä.



Oikea kynäneulan pituuden valinta

Käyttäjystävälliset värikoodit

mylife™ Clickfine® DiamondTip, jossa on 6-särmäinen teknologia ja erittäin ohutseinämäinen kanyyli, on saatavilla neljässä eri pituudessa:



Tuotteet

Tuote	Sisältö	Kanyylin halkaisija	Neulan kärki
mylife™ Clickfine® DiamondTip 4 mm	100 kpl	32G/0,23 mm, Extra Thin Wall	6 särmäinen
mylife™ Clickfine® DiamondTip 5 mm	100 kpl	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	6 särmäinen
mylife™ Clickfine® DiamondTip 6 mm	100 kpl	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	6 särmäinen
mylife™ Clickfine® DiamondTip 8 mm	100 kpl	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	6 särmäinen



Clickfine®

Pituuksissa 10 mm ja 12 mm on saatavana 3-särmäinen kärki ja ohutseinämäinen kanyyli.



Tuotteet


Tuote	Sisältö	Kanyylin halkaisija	Neulan kärki
mylife™ Clickfine® 10 mm	100 kpl	29G/0,33 mm, Thin Wall	3 särmäinen
mylife™ Clickfine® 12 mm	100 kpl	29G/0,33 mm, Thin Wall	3 särmäinen




“Klikkaus” ennen jokaista pistost

Steriili ja kertakäyttöinen

Laita uusi kynäneula ennen jokaista injektiota, jotta välttyt
likaisen ja tylsän neulan aiheuttamilta infektioilta ja muilta
ongelmilta.

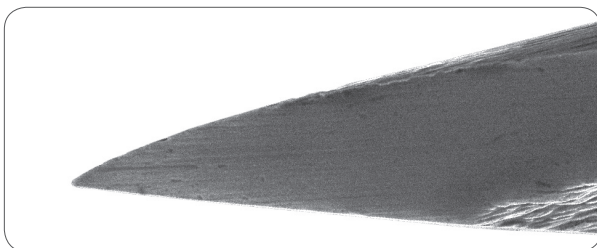

Uusi kynäneula

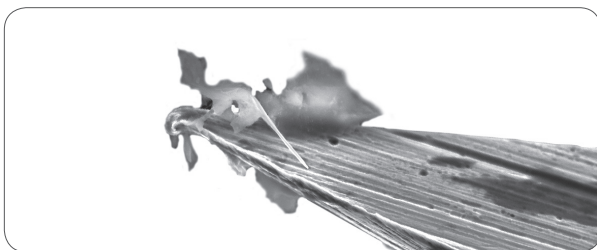

Käytetty kynäneula, jossa kiinni kudoss jäämiä



Tämä kynäneulalaatikon symboli merkitsee sitä,
että neulat ovat **kertakäyttöisiä**.



Clickfine®



Universal Click

Sopii kaikkiin yleisimpiin injektiokyniin⁴

mylife™ Clickfine® -kynäneulat on testattu standardin ISO 11608-2:2012 mukaisesti. Ne ovat täysin toimivia, kun niitä käytetään internetsivulla ja mylife™ Clickfine® -kynäneularasiassa mainittujen injektiokynien kanssa.

Sopii seuraaviin injektiokyniin:



www.mylife-diabetescare.fi/cf/kyna-yhteensopivuus

¹ Tekninen raportti, 2018. Tiedot arkistossa.

² Tulokset käyttäjäkyselystä, jonka IFAK Institut GmbH & Co. KG, Saksa, suoritti kesäkuun 2014 ja kesäkuun 2015 välisenä aikana (tiedot arkistossa).

³ Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, *Clinical Therapeutics*, 35(7):923-933, 2013.

⁴ Katso kynäneularasia tai Internet-sivumme www.mylife-diabetescare.fi.

⁵ Kanyyliin letku on valmistettu lääkinällisten laitteiden valmistukseen tarkoitetusta ruostumattomasta teräksestä – ISO 9626:2016.

⁶ Noudata diabeteshoitajasi suosituksia.

⁷ Frid A. et al.: Hypoglycemia risk during exercise after intramuscular injection of insulin in thigh in IDDM. *Diabetes Care*. 13(5):473-477, 1990.



Diabetescare

More **freedom.**
More **confidence.**
With **mylife™**.



Infuusiomenetelmät



Verensokerimittarit



Hoidon hallinta



Kynäneulat

Ypsomedin mylife™ Diabetescare on laaja diabeetikoille kehitetty tuote- ja palveluohjelma. Se tarjoaa kaiken mitä tarvitaan helppoon, huomaamattomaan ja luotettavaan itsehoitoon. mylife™ Diabetescare'n ansiosta itsehoito on itsestäänselvyys.

10152344-FI-fi/V01

Ypsomed OY // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala //
info@ypsomed.fi // www.mylife-diabetescare.fi // Asiakaspalvelu: +358 (0)9 250 1350

YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS