

# KÄYTTÖOHJE CS -SARJAN RISKIJÄTEASTIOILLE

## Käyttö

Aseta kansi paikoilleen. Paina ensin vastakkaisista kulmista ja sen jälkeen vastakkaisista sivuista. Kuulet napsahduksen kannen painautuessa kiinni.

**Turvallinen käyttö edellyttää, että astiaan merkitty maksimitäyttöraja ei ylity!**



## Kannen sulkeminen

Avaa kansi kääntämällä kannen liikkuvaa osaa vastapäivään. Voit säädellä aukon suuruutta riippuen hävitettävän tuotteen koosta.


Kannen kaksoissulkumekanismi (ohjeet ovat myös kannessa):

### Tilapäinen sulkeminen

Käännä kannen liikkuvaa osaa myötäpäivään kunnes kuulet napsahduksen.

### Lopullinen sulkeminen

**Huomaa, että lopullisen sulkemisen jälkeen astiaa ei voi enää avata.** Käännä kannen liikkuvaa osaa toisen kerran myötäpäivään kunnes kuulet toisen napsahduksen.

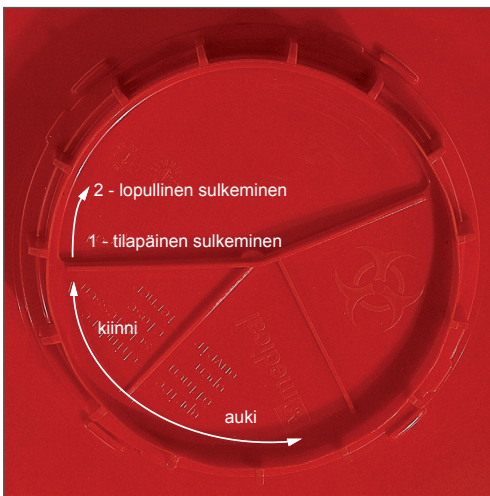

## Neulan poistotavat:



Käytä "V"-mallista poistoaukkoa injektioneulan poistamiseen pidikkeestä.



Käytä "piparkakun"-mallista poistoaukkoa insuliinikynän neulan poistamiseen. Taivuta kynää (vipuvaikutus) ennen kuin kierrät.