

A1CNow[®]+

A1C SYSTEEMI



AMMATTILAISTASON MITTARI



KNORRING OY AB
Mestarintie 4
01730 VANTAA


p. 09-56041
knorring@knorring.fi
www.knorring.fi

Valmistelu

1 ENNEN KUIN ALOITAT

- Varmistu että testin kaikki komponentit ovat samassa lämpötilassa (kuvasa mainitun lämpötilan sisällä).
18 °C (64 °F) 28 °C (82 °F)
- Jos testi tai jotkin testin komponentit ovat olleet yllä mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella, anna niiden lämmitä huoneenlämpötilaan vähintään yhden tunnin ajan.
- Vältä testin suorittamista suorassa auringonvalossa, kuumilla tai kylmillä pinoilla, tai lähellä kylmän / lämmönlähteitä.
- Laadunvarmistuskontrolleja voidaan käyttää tarvittaessa jos halutaan varmistua että testikitti toimii oikein. Tästä lisää ohjeen lisäselosteessa. Ota tarvittaessa yhteyttä myyjään.


Mittari (selkäpuoli)

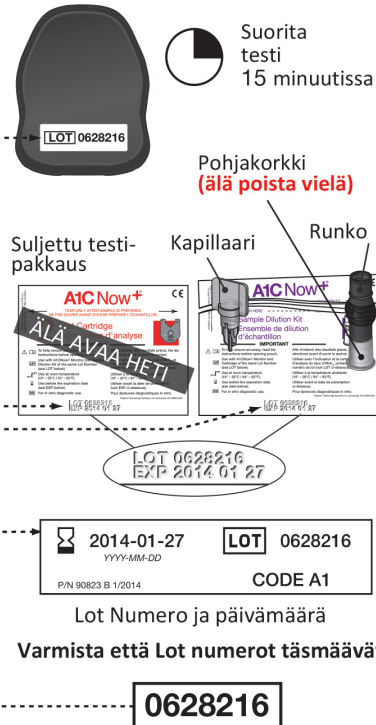

Verinäyte


2 KERÄÄ VERI

Sormenpästä

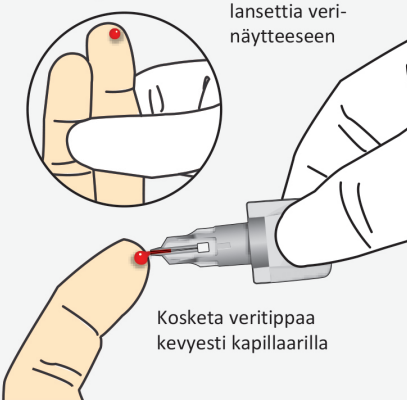


Tai

Suoninäyte



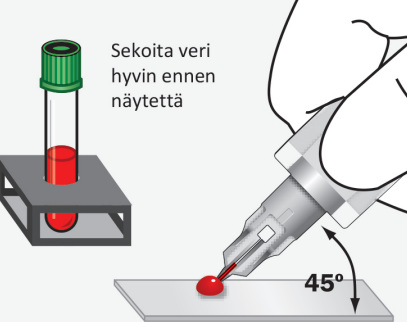


Kerää veri oikeassa kulmassa

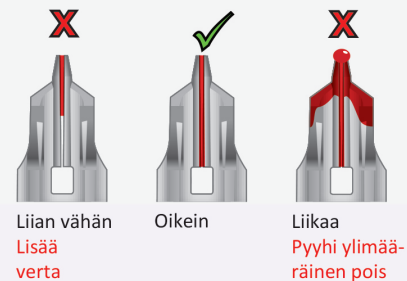


Näytteen valmistus

3 KAPILLAARIN KÄYTTÄMINEN

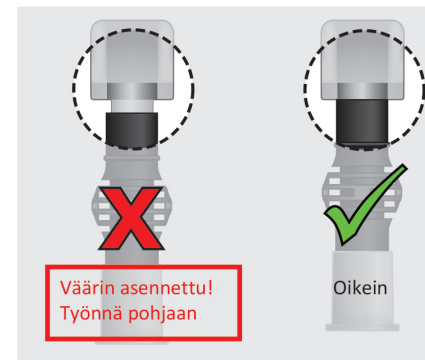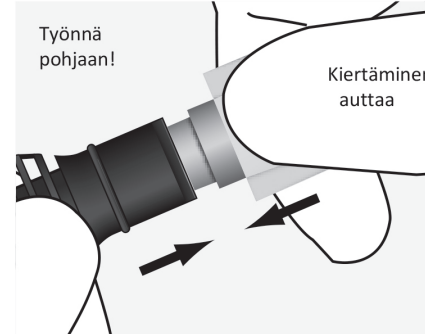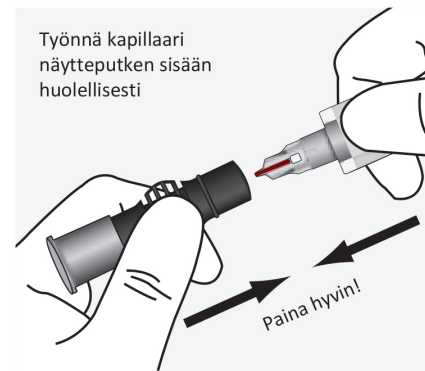


4 RAVISTAMINEN


Ravista näyteputkea 6-8 kertaa sekoittaaksesi veren kemikaaliin

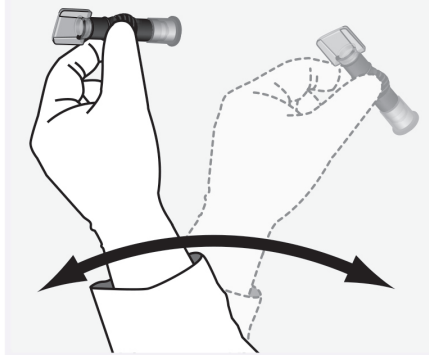

Aseta näyteputki pöydälle pystyasentoon siksi aikaa kun valmistelet testikasetin

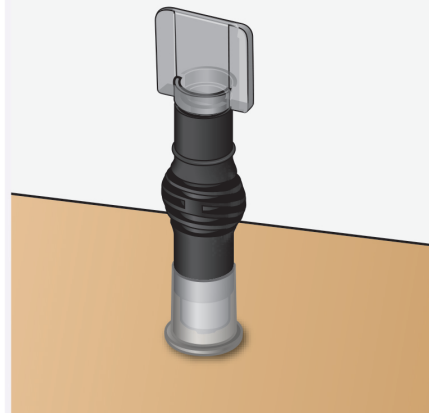

5 TESTIKASETTI

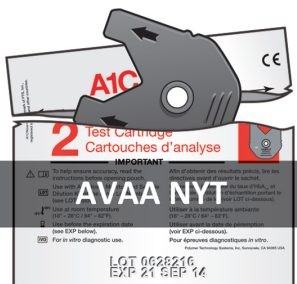

Käytä 2 minuutin kuluessa

Työnnä testikasetti paikalleen "click"



Täsmäävätkö koodit?

Mittarin ja testikasetin koodien tulee täsmätä!


Ota tarvittaessa yhteys myyjään

Mittaaminen

6 MITTARIN VALMISTELU




Poista pohja-korkki

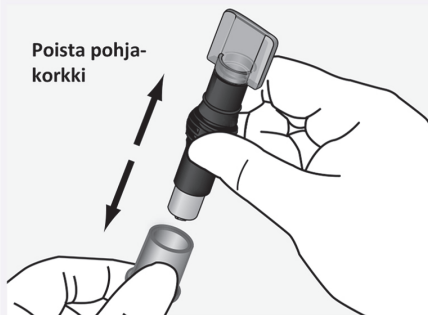

Varmista että mittari on vakaalla alustalla

7 NÄYTE TESTIKASETILLE

On tärkeää että näyteputki tyhjenee kokonaan testikasetille. Paina näyte pohjaan saakka kuvan osoittamalla tavalla. Poista putki heti kasetin päältä kun valmis.

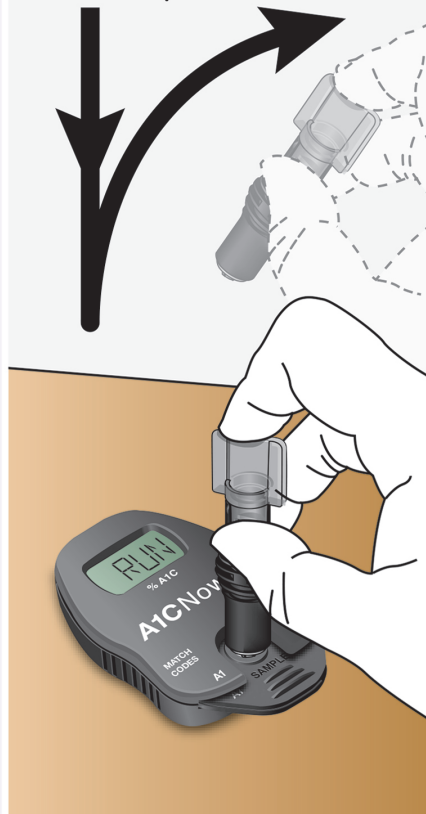

Älä käsittele mittaria analyysin aikana!

Tulokset

8 5 MINUUTIN ANALYYSI



Tämä mittaustulos näkyy näytöllä 60 minuutin ajan tai niin kauan kuin uusi testikasetti asennetaan


* Jos "QCOK" ei ilmesty näyttöön niin ota yhteys myyjään. Lisätietoja virhetilanteista löytyy myös ohjeen lisäselosteesta

Ota tarvittaessa yhteys myyjään!

9 MITTAAMISEN JÄLKEEN



MITATAKSESI UUDESTAAN: Ota uudet testipakkaukset esiin ja aloita uudelleen kohdan 2 mukaisesti

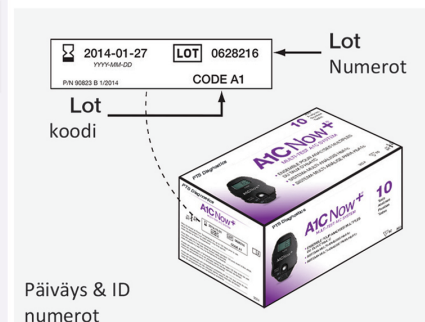

TARKISTA AINA ETTÄ LOT NUMEROT TÄSMÄÄVÄT! Käytä vain pakkauksen mukana tulleita tarvikkeita. Mittari hävitetään kun ko. pakkauksen kaikki testit on käytetty. Jos jonkin muun pakkauksen testikasettia yritetään käyttää, mittari näyttää "00TL" eli 0 testiä jäljellä!